







# 目录

0 page

一、仪器原理	01
二、仪器功效	02
三、适合人群	03
四、禁忌人群	04
五、仪器操作注意事项	04
六、操作流程	06
七、清洁保养	07
八、保修卡	10

## 仪器原理



面部护理仪是一种多功能的皮肤管理美容设备，通过高频振动松动毛孔内的油脂、老废角质和污垢，定位加热皮下组织，促使胶原收缩并刺激其增生，冷导头以低温改善泛红敏感，助力清洁与成分吸收。



面部清洁  
清洁黑头  
粉刺污垢



保湿  
皮肤表皮层保湿



改善肤色  
均匀肤色

## 适用人群



毛孔粗大, 想要皮肤  
更加细腻的人群



肌肤暗黄, 想要美白  
提亮肤色的人群



皮肤干燥, 想要  
深度补水保湿的人群



油脂旺盛, 想要  
清洁皮肤的人群

## 禁忌人群

1. 皮肤有开放性创口的人群。
2. 皮肤有严重过敏症状者。
3. 孕妇, 哺乳期人群。
4. 月经期干净后3天再进行操作。
5. 注射玻尿酸后建议一个月后再进行补水项目。  
避免发生化学反应, 影响玻尿酸的吸收。


## 仪器介绍




## 操作注意事项



操作前用酒精棉片擦拭每个手柄,进行消毒,保持工作头的干净整洁。

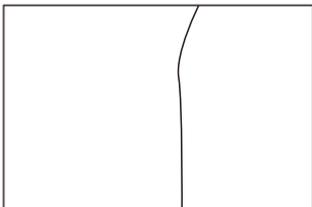

操作头要贴紧皮肤,操作时不应离开皮肤。

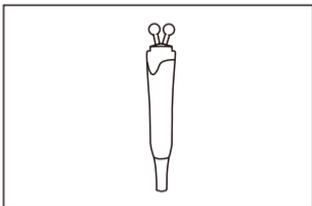

加热手柄需要配合乳液产品使用

# 操作流程

操作前准备物品：透明杯子一个，装清洁头的容器一个，刷子一个，手套，生理盐水一瓶，75%酒精，，化妆棉，玻尿酸原液，精华或者乳液一支，补水面膜。

步骤一：接通电源，按仪器背后的开关按钮进入操作界面。

步骤二：清洁客户的面部，取下客户身上的金属首饰，用酒精棉片或者盐水擦拭治疗头。

步骤三：打开热喷仪，开始操作（一般3-5分钟），有利于打开毛孔。

步骤四：点击左下角的手柄按钮（清洁铲为左下角第一个手柄），调节能量值（范围为3-8），注意手指不要接触手柄上的金属面，不然会没有能量输入，操作时间大约为5分钟。

步骤五：点击导入头，先在脸上涂抹乳液或者精华液，然后开始往上提拉或者打圈的方式向上提升，能量调节范围5-10，以客户觉得温热为主（时常大约5分钟）

步骤六：点击冰锤头，可以定点冷敷也可以滑动冷敷，能量调节15-20之间，（操作时常大约5分钟）

步骤七：敷补水面膜（大约15分钟）

## 清洁保养

- 1、仪器用完后请及时关掉仪器开关并切断电源和拔出电源线,以免造成仪器损坏和影响仪器寿命。
- 2、仪器手柄每次用完后请不要随意乱放,放回手柄架,防止摔坏。
- 3、每次操作完要用酒精棉片擦拭一遍手柄,保持手柄清洁干燥。
- 4、每周要记得清洗废液瓶,每周需要冲洗清洁手柄管道,每次操作完补水手柄一定要排气。
- 5、如果长时间不用仪器,最好用防潮湿和灰尘的袋子把仪器整天保护起来,最好15天左右通电工作一小时,以免内部的电子器件受潮老化。
- 6、仪器属于高精密的电子产品,在操作和放置时,一定不能放在潮湿的环境之中。
- 7、为了仪器的疗程及保证正常的使用寿命,请统一使用原厂家使用的配件,或者原厂家建议的指定配件。

## 仪器参数

名称:面部提升仪

型号:DM-516LB

电压:220v/240.50HZ/60Hz

可调模式:手动和自动

冰锤温度:0-5度



## 配件清单



## 保修

- 1、本机自购买起(凭票据)主机保修一年,一年内出现质量问题免费保修,配件保修三个月。已过保修期的,也可负责维修,收取配件及消耗品的成本费,如需补充或者购买,请与本公司联系。
- 2、注意★:仪器在保修内,对使用以下因个人造成的故障,不提供保修服务,且运费由客户本人承担。  
A:擅自拆装,改装造成本仪器的故障 B:使用时不慎摔打,跌落造成的故障  
C:因缺乏合理保养而造成的故障 D:没按使用说明书或者使用说明视频正确指导造成的故障。

# 维修记录

维修日期	故障原因	维修内容