



目录

0 page

一、仪器原理	01
二、仪器功效	02
三、适合人群	03
四、禁忌人群	04
五、界面介绍	05
六、仪器操作注意事项	06
七、操作流程	08
八、清洁保养	08
九、仪器参数	09
十、保修卡	

仪器原理



韩国氢氧水雕是一种多功能的皮肤管理美容设备，它是通过将纯净水通过净化变成氢氧离子水，在皮肤表面形成细小的 H^2 分子，从而将水分子快速渗透到皮肤深层，达到深层补水的效果，并结合雾化原理，直达皮肤深层使补水更彻底，另外搭配了小气泡头可以清洁毛孔。

仪器功效



面部清洁
深层清洁面部
粉刺污垢



深层补水
皮肤深层补水保湿
效果佳



收缩毛孔
提亮肤色收缩
毛孔



亮透紧实
皮肤饱满紧实保持
莹润透亮

适用人群



毛孔粗大, 想要皮肤
更加细腻的人群



肌肤暗黄, 想要
提亮肤色的人群



皮肤干燥, 想要
深度补水保湿的人群




细纹过多, 想要
改善细纹的人群

禁忌人群


1. 皮肤有开放性创口的人群。
2. 皮肤有严重过敏症状者。
3. 孕妇，哺乳期人群。
4. 月经期干净后3天再进行操作。
5. 注射玻尿酸后建议一个月后再进行补水项目。

避免发生化学反应，影响玻尿酸的吸收。


仪器介绍

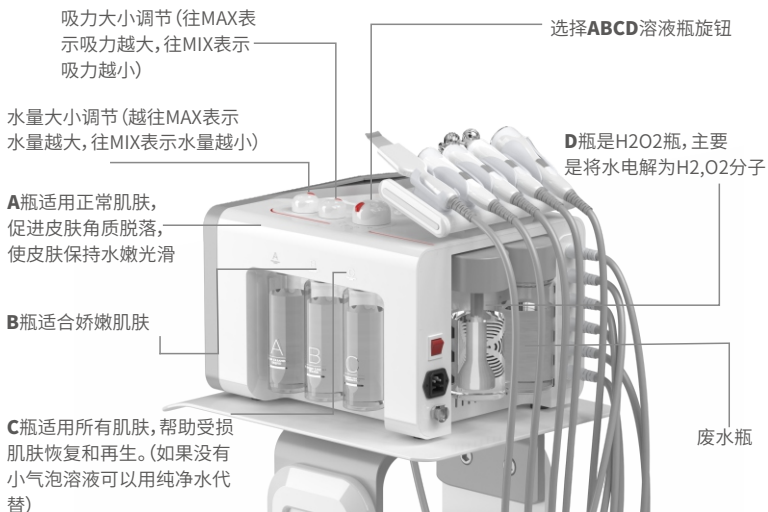

操作注意事项

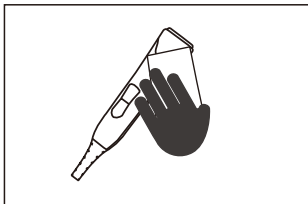

操作前用酒精棉片擦拭每个，保持工作头的干净整洁。

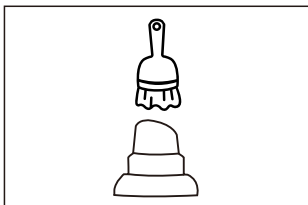


清洁头在使用后可以先用酒精消毒，擦干后用化妆刷刷干净，不然清洁手柄容易堵塞，导致没有吸力。




每次操作完要清洗管道（方法为任意溶液瓶中以纯净水加酒精3:1的量加入瓶中，然后把吸力调最大，水量调最大，用大拇指堵住清洁头，捂一下松一下，按启动键，连续这样操作，以免脏东西堵塞手柄）。


操作注意事项

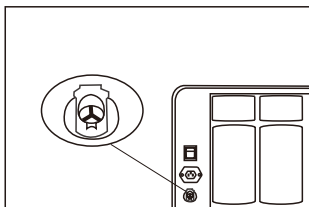

每用补水手柄操作完一个客户仪器背后
左下角小孔要放气。

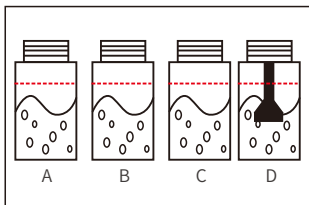


氢氧瓶装三分之一的纯净水或者蒸馏水，
注意不要装的太满。

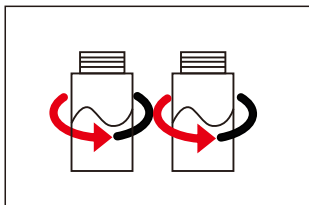


注意废水瓶和溶液瓶要拧紧，不然会漏
气，清洁手柄没压力，另外废水瓶记得一
个星期清洗一次。

操作注意事项

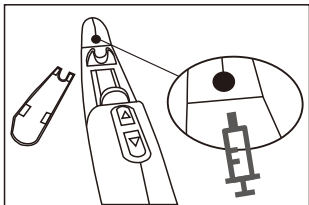

容器放入到补水手柄卡槽中一定要卡紧，否则容易漏液，操作过程中注意避开客户嘴角，鼻孔，眼睛。

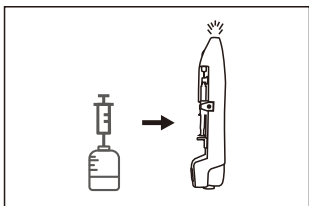

补水手柄操作完，马上装2ML生理盐水冲洗几遍（把速度调制0.3s，出液量调制最大，按正常启动，冲洗容器残留的液体，防止堵塞手柄）。

操作流程

操作前准备物品:透明杯子一个,装清洁头的容器一个,刷子一个,手套,生理盐水一瓶,75%酒精,黑头导出液,毛孔收缩液,化妆棉,玻尿酸原液,精华或者乳液一支,2.5ML容器,补水面膜。

步骤一:接通电源,按仪器背后的开关按钮进入操作界面。

步骤二:清洁客户的面部,取下客户身上的金属首饰,用酒精棉片或者盐水擦拭治疗头。

步骤三:用化妆棉沾湿黑头导出液贴在客户的鼻子以及三角区内,然后打开热喷仪,开始操作(一般3-5分钟),有利于打开毛孔。

步骤四:点击左下角的手柄按钮(清洁铲为左下角第一个手柄),调节能量值(范围为3-8),注意手指接触手柄上的金属面,不然会没有能量输入,操作时间大约为5分钟。

步骤五:打开清洁手柄,调节吸力和水量大小,按下手柄上的开始键开始操作,着重鼻子和嘴角周围比较深的部位清洁,先在自己手上试下吸力大小,操作手法可以采用点对点 and 旋转手法。

A:沿下颌部位,从下巴到耳根点对点吸附 B:从嘴角到耳中点对点吸附

C:从鼻翼到太阳穴按点对点吸附手法 D:下眼周及额头

E:最后操作鼻部 F:操作时间大约10分钟

操作流程

步骤六：点击补水手柄的界面，将2.5ML的容器抽取玻尿酸原液或者其他溶液放入卡槽中，调节界面参数（模式选择CON，剂量选择02或者04，操作速度选择0.5或者1.0），点击补水手柄按钮开始操作，（操作时补水手柄与皮肤成45度角从下往上开始喷射，枪口离皮肤距离为2-3cm），一般一张脸5ML，如果皮肤干燥的可以操作多一点（时间大约10-15分钟）

步骤七：点击导入头，先在脸上涂抹乳液或者精华液，然后开始往上提拉或者打圈的方式向上提升，能量调节范围5-10，以客户觉得温热为主（时常大约5分钟）

步骤八：点击冰锤头，可以定点冷敷也可以滑动冷敷，能量调节15-20之间，（操作时常大约5分钟）

步骤九：操作完毕，清洁操作手柄，然后在仪器后面左下角放气。

步骤十：敷补水面膜（大约15分钟）

清洁保养

- 1、仪器用完后请及时关掉仪器开关并切断电源和拔出电源线，以免造成仪器损坏和影响仪器寿命。
- 2、仪器手柄每次用完后请不要随意丢放，放回手柄架，防止摔坏。
- 3、每次操作完要用酒精棉片擦拭一遍手柄，保持手柄清洁干燥。
- 4、每周要记得清洗废液瓶，每周需要冲洗清洁手柄管道，每次操作完补水手柄一定要排气。
- 5、如果长时间不用仪器，最好用防潮湿和灰尘的袋子把仪器整天保护起来，最好15天左右通电工作一小时，以免内部的电子器件受潮老化。
- 6、仪器属于高精密的电子产品，在操作和放置时，一定不能放在潮湿的环境之中。
- 7、为了仪器的疗程及保证正常的使用寿命，请统一使用原厂家使用的配件，或者原厂家建议的指定配件。

仪器参数

名称:氢氧水雕	冰锤温度:0-5度
型号:DM-516A	产品探头:清洁吸头
电压:220v/240.50HZ/60Hz	负压清洁手柄:压力90Kpa, 流量30LF
技术:氢氧分离技术	尺寸:长宽高:30.5X45X110CM
深度:0.2mm-3.0mm	
可调模式:手动和自动	
超音波:频率3M电容5600±15%PF	

配件清单

 主机	 手柄	
 挂件	 电源线	 清洁吸头

| 保修

- 1、本机自购买起(凭票据)主机保修一年,一年内出现质量问题免费保修,配件保修三个月。已过保修期的,也可负责维修,收取配件及消耗品的成本费,如需补充或者购买,请与本公司联系。
- 2、注意★:仪器在保修内,对使用以下因个人造成的故障,不提供保修服务,且运费由客户本人承担。
A:擅自拆装,改装造成本仪器的故障 B:使用时不慎摔打,跌落造成的故障
C:因缺乏合理保养而造成的故障 D:没按使用说明书或者使用说明视频正确指导的造成的故障。

维修记录

维修记录表			
产品名称		购买日期	
经销店名称		电话	
经销店地址			
顾客名称		电话	
顾客地址			
维修日期	故障原因	维修内容	

