



SILK ARE

纳米水光使用说明






# 目录

0 page

|        |    |
|--------|----|
| 一、仪器原理 | 01 |
| 二、仪器功能 | 02 |
| 三、界面介绍 | 04 |
| 四、注意事项 | 06 |
| 五、操作流程 | 06 |
| 六、仪器参数 | 07 |
| 七、保修记录 | 08 |

## 仪器原理

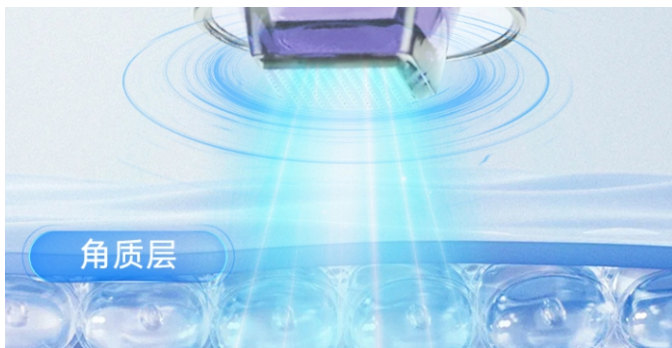

纳晶(纳米晶片)导入技术,可打开皮肤通道,将经皮吸收的产品导入促进其吸收;可以在不伤害皮肤表皮层,保证皮肤完整性的条件下,穿透皮肤角质层,安全无创、快速打开皮肤渗透通道,使得有效成分送达皮肤深层,显著提高吸收效果。关键是无痛无伤害,安全便捷,高效的促渗工具。



改善皮肤

加快细胞新陈代谢



智能化技术

精准内置参数, 更易上手操作



无恢复期

零创伤, 舒适无痛

## 适用人群



毛孔粗大, 想要皮肤  
更加细腻的人群



肌肤暗黄, 想要美白  
提亮肤色的人群



皮肤干燥, 想要  
深度补水保湿的人群



油脂旺盛, 想要  
清洁皮肤的人群

## 护理周期


对于皮肤干燥缺水的人来说,前期需要每周护理一次,以给皮肤补充水分和营养。后期可根据皮肤状况每半个月进行一次护理。一个疗程为6次。可以视实际情况确定需要几个疗程的护理。

## 护理注意事项

- ① 操作结束后皮肤6小时内不能沾水,不能进行剧烈运动,不能饮酒吃辛辣食物。
- ② 可以使用医用修复液等无菌修复产品。
- ③ 护理结束6小时后可用清水洗脸。第二天可以使用无严重刺激性的洗面奶。一周内严格注意面部防晒。
- ④ 纳米微晶水光为无痛无创、无副作用。

## 禁忌人群

- 1.皮肤有开放性创口的人群。
- 2.皮肤有严重过敏症状者。
- 3.孕妇,哺乳期人群。
- 4.月经期干净后3天再进行操作。
- 5.注射玻尿酸后建议一个月后再进行补水项目。  
避免发生化学反应,影响玻尿酸的吸收。

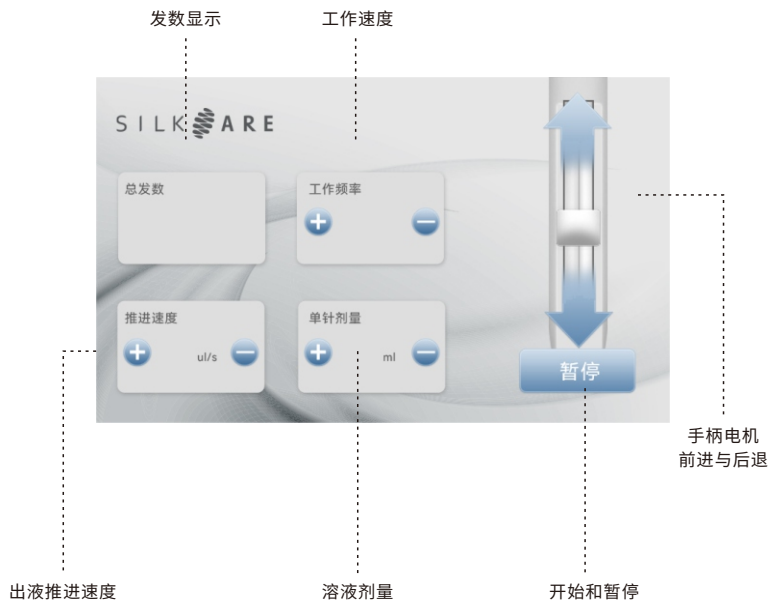




## 仪器示意



## 操作注意事项

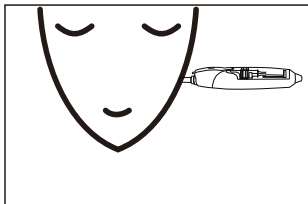

操作头要贴紧皮肤，操作时不可以离开皮肤。



按开始键之前，保证面部有一定的产品介质之后，再按开始，工作频率可以从低调起。

# 操作流程

操作前物品准备：一次性洗脸巾、洁面乳、口罩、手套、生理盐水、药水、医用面膜。

步骤一：取下客户的金属首饰，用酒精棉片擦拭探头。

步骤二：面部清洁，操作时使用相对应产品操作。

步骤三：仪器操作时必须贴紧皮肤操作。由外向内的打圈方式操作。面部走三条线，下巴到耳下方向、嘴角到耳中方向、鼻翼到耳前。

步骤四：推进速度，建议调8.0或者8.7ul/s，操作时间为25~30分钟，向内打圈即刻，及时进行产品的添补。建议疗程3-6次，1个月一次。

步骤五：操作完毕使用补水面膜。

# 使用注意事项

- 1、仪器用完后请及时关掉仪器开关并切断电源和拔出电源线，以免造成仪器损坏和影响仪器寿命。
- 2、每次操作完后手柄、负极贴片以及主机要用酒精棉片擦拭一遍手柄，保持手柄清洁干燥。
- 3、仪器手柄每次使用完后请不要随意丢放，放回手柄架，防止摔坏。
- 4、**注意：操作前，针筒抽取生理盐水放入手柄里面进行冲洗一遍，仪器每次操作前和操作后都需要用生理盐水冲洗一遍。仪器手柄需要用75°酒精棉片整体消毒。**
- 5、仪器属于高精密的电子产品，在操作和放置时，一定不能放在潮湿的环境之中。

## 仪器参数

产品名称:纳米水光

设备额定电压:AC220V

设备电流类型:交流

设备额定输入功率:10VA

输出功率:MAX 250W



## 保修

- 1、本机自购买起(凭票据)主机保修一年,一年内出现质量问题免费保修,配件保修三个月。已过保修期的,也可负责维修,收取配件及消耗品的成本费,如需补充或者购买,请与本公司联系。
- 2、注意 :仪器在保修内,对使用以下因个人造成的故障,不提供保修服务,且运费由客户本人承担。  
A:擅自拆装,改装造成本仪器的故障 B:使用时不慎摔打,跌落造成的故障  
C:因缺乏合理保养而造成的故障 D:没按使用说明书或者使用说明视频正确指导  
造成的故障。

# 维修记录

| 维修记录表 |      |      |  |
|-------|------|------|--|
| 产品名称  |      | 购买日期 |  |
| 经销店名称 |      | 电话   |  |
| 经销店地址 |      |      |  |
| 顾客名称  |      | 电话   |  |
| 顾客地址  |      |      |  |
| 维修日期  | 故障原因 | 维修内容 |  |
|       |      |      |  |
|       |      |      |  |
|       |      |      |  |
|       |      |      |  |
|       |      |      |  |